

# ISTRUZIONI PER L'USO

## MASCHERA FACCIALE A USO MEDICO




### IDENTIFICAZIONE ED IMPIEGO MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO ISO 14683 E ISO 10993

<b>ARTICOLO</b>	<b>40303.PF2BACTY MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO TIPO I</b>
<b>TIPOLOGIA E DESTINAZIONE D'USO</b>	<b>MASCHERA AD USO MEDICO DI TIPO I IN TESSUTO NON TESSUTO MONOUSO , ,NON STERILE</b>  La mascherina agisce da barriera , per ridurre al minimo la trasmissione diretta di agenti infettivi tra le persone. Idonea a proteggere cittadini e lavoratori secondo quanto previsto dal Dlg. 17 marzo , nr. 18 , La mascherina <b>40303.PF2BACTY</b> è conforme alle norme ISO 14683- Requisiti e Metodi di Prova e ISO 10993 - valutazione biologica dei Dispositivi medici e valutazioni e prove di un processo di gestione del rischio.
<b>COMPOSIZIONE</b>	<b>LATO INTERNO ANTIBATTERICO TNT SPUNLACE</b> In viscosa, poliestere e binder antibatterico, con disegno a onde bianco e azzurro Morbida e delicata , non irritante o sensibilizzante. <b>LATO ESTERNO IDROREPELLENTE TNT SPUNLACE</b> Polpa di cellulosa, poliestere con trattamento idrorepellente .Superficie liscia di colore verde o blu <b>ELASTICO</b> : Lycra Non Irritante, Non Sensibilizzante
<b>FILTRAZIONE</b>	<b>POTERE DI FILTRAZIONE: TIPO I, <math>\geq 95\%</math></b>
<b>FORMA</b>	Forma rettangolare con elastico superiore ed elastico inferiore

### Istruzioni utilizzo

La maschera ha una forma rettangolare , non prevede due elastici laterali per orecchie . E' dotata di due elastici posti nella parte superiore ed inferiore della maschera

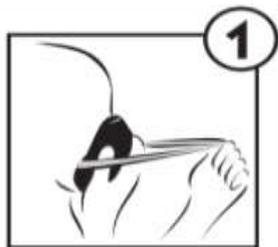

Afferrare i due elastici superiore ed inferiore e indossarli dalla testa.



Posizionare la mascherina sul viso e regolare l'elastico inferiore sul collo e l'elastico superiore sulla nuca .



Adattare la mascherina sul viso a protezione del naso e della bocca .

Posizionare secondo l'esigenza gli elastici sulla nuca e sul collo come da foto , per un miglior comfort , assicurandosi che bocca e naso siano perfettamente protetti . Le dimensioni e l'arricciatura elasticizzata della maschera consentono una vestibilità adattabile a diverse conformazioni facciali.

**ULTERIORI INFORMAZIONI** : Il prodotto non necessita di particolari precauzioni. Stoccare le confezioni in luogo asciutto , lontano da fonti di calore e umidità . Proteggere i dispositivi contenuti nelle plastic bags di cartene in Polietilene HDPE ad alta densità e resistenza , assicurandosi di richiudere il sacchetto dopo ogni prelievo , con un nodo o nastro adesivo , al fine di evitare contaminazioni aerobiche esterne e umidità.

Smaltimento Dopo l'utilizzo , non disperdere nell'ambiente e smaltire secondo il caso , in conformità alle leggi vigenti sui rifiuti.

**Data di scadenza** : 5 anni dalla data di produzione riportata su etichetta .