



Design : Ear hangtype

Bacterial Filtration Efficiency (BFE) : $\geq 98 \%$

Viral Filtration Efficiency (VFE) : $\geq 98 \%$

Particulate Filtration Efficiency (PFE) : $\geq 94 \%$

Inhalation / Exhalation Resistance : resistance at 30 l/min: <0.7mbar Inhalation resistance at 95 l/min: <2.4mbar Exhalation

NaCl Aerosol Penetration Test : $\leq 5\%$

Primary Skin Irritation Index : 0

Dermal Sensitization : No response observed

Inward Leakage TIL : 4.8%

PACKING : 5 /10 pcs

FACE MASK 9591 KN95

MASCHERA ANTIPOLVERE MONOUSO IN T.N.T.

STANDARD utilizzato: GB 2626-2006 KN95

Prodotta nella Repubblica Popolare Cinese da Zhejiang Alita Industriali CO., LTD
Importata in Italia da G.B. WALL SRL - Via Puglie 65/ r - Verona La data di scadenza del prodotto integro e non aperto è di anni 3 dalla data di produzione stampata sulle istruzioni all'interno della confezione, purché conservato in luogo asciutto con meno dell'80% di umidità relativa e ad una temperatura tra -20°C e +30°C.

IMPORTANTE: prima dell'uso l'utilizzatore deve leggere e comprendere le istruzioni sull'uso e le limitazioni ed avvertenze di utilizzo. Conservare queste istruzioni per ogni futuro utilizzo.

NON USARE: per pitture a spruzzo o applicazioni a sabbia. Non utilizza in condizioni ambientali ove la concentrazione di ossigeno sia inferiore al 19,5%. Non utilizzabile per ambienti con oli nebulizzati.

LIMITAZIONI E AVVERTENZE DI UTILIZZO:

1. L'utilizzatore deve essere Istruito su l'utilizzo corretto del prodotto in forma prima di utilizzare questo respiratore.
2. Non utilizzare questo respiratore quando le concentrazioni di contaminanti sono immediatamente pericolose per la vita o la salute.
3. In caso di difficoltà respiratorie o vertigini o altre difficoltà, lasciare immediatamente l'area contaminata.
4. Scartare e sostituire il respiratore se danneggiato o se la difficoltà respiratoria diventa eccessiva.
5. Ispezionare il respiratore in tutte le sue parti prima di ogni utilizzo per assicurarsi della sua integrità.
6. Non modificare, pulire, o utilizzare impropriamente di questo respiratore.
7. Non utilizzare con barba o altri peli del viso o altre condizioni che impediscono una buona tenuta tra la faccia e il bordo del respiratore.
8. Questo prodotto può essere utilizzato nella misura richiesta dalle normative governative applicabili.
9. La mancata osservanza di tutte le istruzioni e avvertenze sull'uso di questo respiratore e / o il mancato utilizzo di questo respiratore durante tutti i periodi di esposizione possono ridurre l'efficacia del respiratore stesso



Bustine da 5 Pz